

Cathego Cathego plus

Instrucciones de uso de las bandas para el brazo Cathego y Cathego plus

Uso previsto

Las bandas para el brazo Cathego y Cathego plus están diseñadas para proteger productos sanitarios y vendajes, como catéteres de inserción periférica (PICC), catéteres de línea media y otros tipos de catéteres o vendajes tejidos que se utilicen en el brazo.

Funcionamiento

Las bandas para el brazo protegen contra daños mecánicos del producto sanitario o vendaje que pueden producirse, por ejemplo, al enredarse el catéter o el vendaje durante actividades físicas o al quitarse y ponerse la ropa. De este modo, previenen que el catéter o el vendaje en el brazo se desplacen o corten. El ajuste anatómico, la gran elasticidad de la tela y las tiras antideslizantes sin silicona en los extremos permiten un uso cómodo y reducen los puntos de presión. Las bandas están previstas para usarse únicamente en un o una paciente.

Indicaciones

Prevención del desplazamiento o desprendimiento de dispositivos sanitarios
Prevención del desprendimiento prematuro de vendajes

Efectos secundarios

Hasta el momento, no se conocen efectos secundarios al utilizar el producto según lo previsto. Sin embargo, si la banda se coloca con demasiada firmeza, pueden ocasionarse puntos de presión o se pueden apretar vasos sanguíneos y nervios.

Contraindicaciones


Consulte a su médico o médica antes de utilizar la banda en los siguientes casos:

- Enfermedades o heridas en la piel de la zona de aplicación, en particular, si hay signos de inflamación, como irritación, una mayor temperatura o hinchazón
 - Trastornos sensitivos y circulatorios en la zona de aplicación
 - Trastornos del drenaje linfático e hinchazones sin motivo aparente
- Si utilizar la banda genera una sensación molesta, dolores fuertes, irritación, hinchazón, secreciones en la zona de colocación del catéter o del vendaje, daños en el catéter o el vendaje, u otras molestias, deje de usarla y contacte con su médico o médica.

Instrucciones de uso

Las bandas Cathego y Cathego plus pueden utilizarse en ambos brazos entre la muñeca y la axila. No tienen una parte superior, inferior, delantera o trasera. Para que la banda quede fija, se deben dejar las tiras antideslizantes en el interior y el logo de thego.care debe hallarse en la parte exterior. La banda para el brazo puede dañarse al colocarse y quitarse por los cantos afilados, por ejemplo, de anillos o brazaletes. Por eso, recomendamos quitarse estos accesorios antes de colocar y quitar la banda o, si no es posible, cubrirlos con un apósito o una cinta.

Colocación de la banda Cathego o Cathego plus:

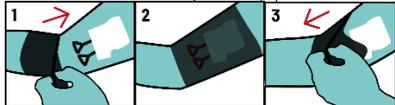

1. Coja un extremo de la banda y tire cuidadosamente para subirla por el brazo. Estire la banda elástica a la altura de la zona de aplicación en su brazo al tirar de manera que la banda no se enganche con el producto sanitario, el vendaje o lo que tenga en su brazo.

2. La banda se habrá colocado correctamente cuando cubra por completo el producto sanitario, el vendaje o el elemento que esté utilizando en la zona de aplicación. Si está utilizando la banda Cathego plus, asegúrese de que el producto sanitario, el vendaje o el elemento que esté usando se posición en la protuberancia.

Retirada de la banda Cathego o Cathego plus:

3. Para quitarse la banda, estírela desde el extremo superior al tirar de ella y retírela con cuidado, de manera que no quede enganchada con

el producto sanitario, el vendaje o el elemento que esté usando en su brazo.

Importante:

- **La banda puede utilizarse todo el tiempo que usted quiera mientras no le genere molestias. Sin embargo, no puede usarse por más de 24 horas seguidas.**

- **Las bandas Cathego y Cathego plus pueden reutilizarse varias veces, pero siempre en el mismo o la misma paciente. La reutilización en otros u otras pacientes puede provocar una contaminación cruzada.**

- **Antes de cada uso, asegúrese de que la banda funcione correctamente y no tenga signos de desgaste ni daños. No utilice el producto si está dañado.**

- Si la banda está muy apretada o muy suelta, seleccione otra talla.

- Las bandas para el brazo se someten a un exhaustivo control de calidad. Sin embargo, siempre puede contactar con nosotros si tiene alguna queja.

Obligación de notificación

Las disposiciones legales establecen que las y los pacientes y usuarios deben notificar sin demora al fabricante y a la autoridad nacional competente (en España: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - AEMPS) si se presenta una situación de gravedad al utilizar un producto sanitario.

Composición

73 % poliamida, 27 % elastano

Cinta de recubrimiento de la costura principal: poliuretano, poliamida

Tiras antideslizantes: elastómero termoplástico

Instrucciones para el cuidado del producto

- La banda debe lavarse antes del primer uso.

- Lave la banda por separado dentro de una bolsa y a una temperatura máxima de 40 °C. Utilice un detergente suave sin suavizante ni lejía y enjuague bien la banda. La banda puede centrifugarse de manera cuidadosa.

- Restablezca la forma de la banda y deje que se seque al aire libre. No seque la banda en la secadora, sobre un radiador ni con luz solar directa y no le aplique nunca una plancha caliente.

- Con el objetivo de mantener la calidad de su banda, no utilice productos de limpieza químicos, lejías, bencina ni suavizantes. Prevenga el contacto con elementos grasosos o ácidos, ungüentos o lociones. Estas sustancias pueden afectar el material de la banda o perjudicar el funcionamiento.

- Guarde la banda en un lugar seco, a temperatura ambiente (15 - 25 °C), y protegido del sol y del calor.

- El cuidado regular de la banda garantiza un funcionamiento óptimo.



Modo de lavado para ropa delicada a un máx. de 40 °C



No blanquear



No secar en secadora



No planchar



No limpiar con productos químicos

¡No usar suavizante!



Producto sanitario



Reutilizable en un mismo paciente



Manufacturer:

thego.care SAS

15 rue du village

F-25370 Saint-Antoine / France

www.thego.care | | Made in EU

04/2024