


Instrucciones para medir la protección para la ducha Logo Proof




Protección para la ducha Logo Proof


Para determinar la talla correcta, utilice una cinta métrica para medir la circunferencia del brazo en los puntos marcados en la imagen 1, en la parte superior del brazo por debajo de la axila (imagen 2) y en el antebrazo por debajo del codo (imagen 3).

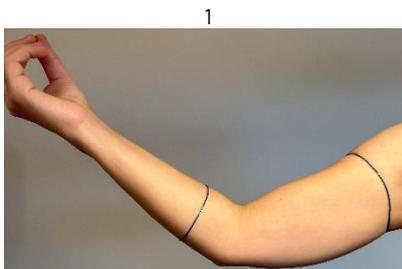

Las bandas marcan los puntos del brazo que hay que medir

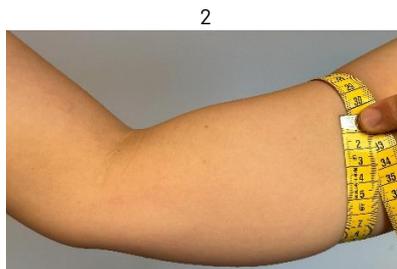

Medir la circunferencia del brazo por debajo de la axila con una cinta métrica.

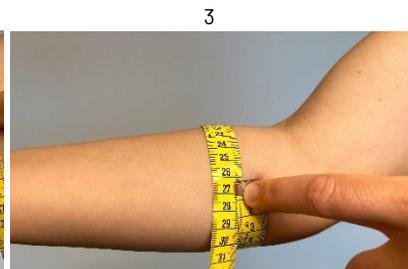

Medir la circunferencia del brazo en el antebrazo por debajo del codo.

En caso de duda, elija la talla más pequeña.

Si observa una gran diferencia entre la circunferencia del brazo en la parte superior y en la inferior, de modo que no le quede bien ninguna de las dos tallas, también puede llevar el Logo Proof completamente en la parte superior del brazo (fig. 5), de modo que ambos labios se ajusten bien y envuelvan bien el brazo. En este caso, mida la circunferencia del brazo por encima del codo (fig. 4) en lugar de por el antebrazo.



Medir la circunferencia del brazo por encima del codo



El Logo Proof también puede llevarse completamente en la parte superior del brazo

Los dos labios del Logo Proof deben encerrar el brazo para que quede ajustado.