


## Instructions de mesure pour la protection de douche Logo Proof



Protection de douche Logo Proof


Pour déterminer la taille qui vous convient, mesurez la circonférence de votre bras aux endroits indiqués sur la photo 1 à l'aide d'un mètre-ruban, sur le bras en dessous de l'aisselle (photo 2) ainsi que sur l'avant-bras en dessous du coude (photo 3).

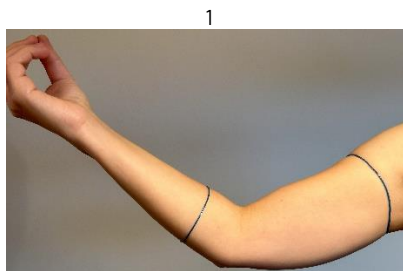

Les rubans marquent les endroits à mesurer sur le bras




Mesurez la circonférence du bras sous l'aisselle à l'aide d'un mètre-ruban.

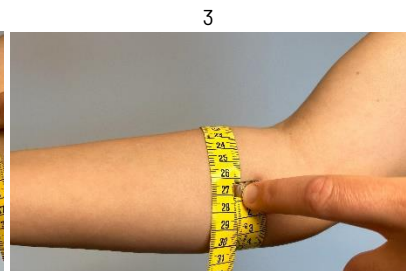

Mesurez la circonférence du bras à l'avant-bras, sous le coude.

En cas de doute, choisissez la taille la plus petite.

Si vous constatez une grande différence entre la circonférence du bras au niveau du bras supérieur et de l'avant-bras, de sorte qu'aucune des tailles ne convient, vous pouvez également porter le Logo Proof entièrement sur le bras supérieur (image 5), afin que les deux lèvres soient bien ajustées et entourent le bras de manière étanche. Dans ce cas, veuillez mesurer la circonférence du bras sur le haut du bras au-dessus du coude (image 4) au lieu de l'avant-bras.

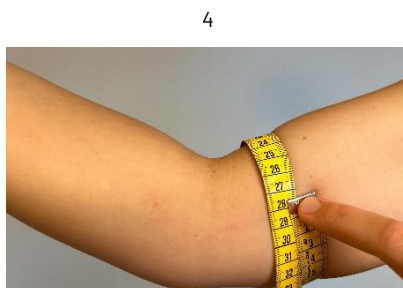

Mesurer la circonférence du bras au-dessus du coude



Le Logo Proof peut également être porté entièrement sur le bras supérieur

Les deux lèvres du Logo Proof doivent entourer fermement le bras pour être étanches.