

Messanleitung für die Alltagsarmbinde Cathego



Cathego Armbinde

Zur Bestimmung der passenden Grösse messen Sie bitte den Armumfang an den auf Bild 1 gekennzeichneten Stellen mit Hilfe eines Messbandes unterhalb der Achsel (Bild 2) und oberhalb des Ellenbogens (Bild 3).



1
Die Bänder kennzeichnen die zu messenden Stellen am Arm

2
Mit Hilfe eines Messbandes den Armumfang unterhalb der Achsel messen

3
Den Armumfang oberhalb des Ellenbogens messen

Wählen Sie im Zweifel die kleinere Grösse aus.

Stellen Sie einen grossen Unterschied zwischen dem Armumfang am oberen Oberarm (Bild 2) und dem unteren Oberarm (Bild 3) fest, so dass keine der Grössen gleichzeitig oben (Bild 2) und unten (Bild 3) passt, ist der Cathego nicht geeignet.

Die Armbinde Cathego sollte weder zu eng sitzen und den Arm abpressen, noch sollte sie zu locker sitzen und rutschen.