


Messanleitung für den Duschschutz Logo Proof




Logo Proof Duschschutz


Zur Bestimmung der passenden Grösse messen Sie bitte den Armumfang an den auf Bild 1 gekennzeichneten Stellen mit Hilfe eines Messbandes am Oberarm unterhalb der Achsel (Bild 2) sowie am Unterarm unterhalb des Ellenbogens (Bild 3).

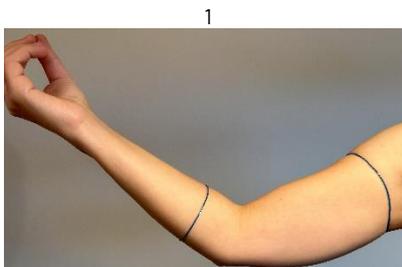

Die Bänder kennzeichnen die zu messenden Stellen am Arm

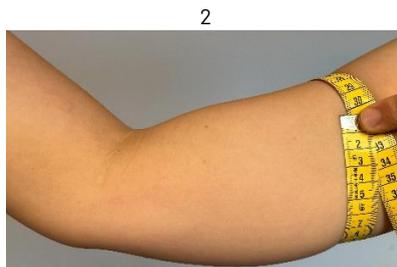


Mit Hilfe eines Messbandes den Armumfang unterhalb der Achsel messen

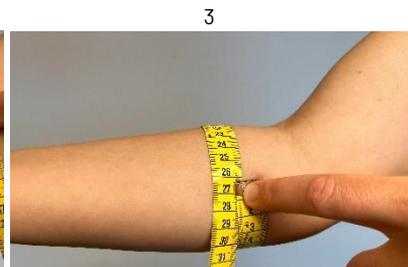

Den Armumfang am Unterarm unterhalb des Ellenbogens messen

Wählen Sie im Zweifel die kleinere Grösse aus.

Stellen Sie einen grossen Unterschied zwischen dem Armumfang an Ober- und Unterarm fest, so dass keine der Grössen passt, können Sie den Logo Proof auch vollständig am Oberarm tragen (Bild 5), damit beide Lippen gut sitzen und den Arm dicht umschliessen. In diesem Fall messen Sie bitte den Armumfang am Oberarm oberhalb des Ellenbogens (Bild 4) anstatt am Unterarm.

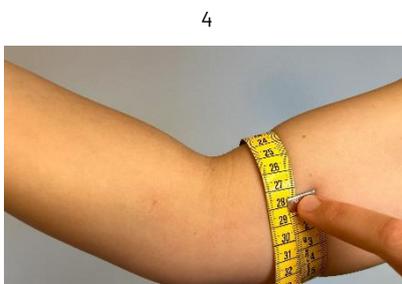

Den Armumfang oberhalb des Ellenbogens messen



Der Logo Proof kann auch vollständig am Oberarm getragen werden

Die beiden Lippen des Logo Proof müssen den Arm vollständig umschliessen, um dicht zu sein.