

Istruzioni per la misurazione della fascia da braccio Cathego



Fascia da braccio Cathego

Per determinare la taglia giusta, misurare la circonferenza del braccio nei punti indicati nell'immagine 1 con un metro sotto l'ascella (immagine 2) e sopra il gomito (immagine 3).



1
Die Bänder kennzeichnen die zu messenden Stellen am Arm

2
Mit Hilfe eines Messbandes den Armumfang unterhalb der Achsel messen

3
Den Armumfang oberhalb des Ellenbogens messen

In caso di dubbio, scegliere la taglia più piccola.

Se si nota una grande differenza tra la circonferenza del braccio superiore (Fig. 2) e quella inferiore (Fig. 3), tanto che nessuna delle due taglie si adatta contemporaneamente alla parte superiore (Fig. 2) e a quella inferiore (Fig. 3), il Cathego non è adatto.

La fascia da braccio Cathego non deve essere troppo stretta e comprimere il braccio, né troppo larga e scivolare.